



Kikuhime trykmåler

Brugervejledning


Kalibrering

På grund af ændringer i det atmosfæriske tryk bør måleren ved opstart kalibreres, hvis værdien på displayet er mere end ± 1 mmHg.

1. For at udføre en 0 mmHg-kalibrering skal der tændes for måleren, uden at sensoren er tilsluttet. Tryk på knappen "Power".
2. Kontrollér at trykangivelsen er \pm mmHg på displayet.
3. Hvis der er behov for justering, benyttes den lille gule skruetrækker til at dreje på justerings-skruen (findes øverst på apparatet), indtil der vises 0 mmHg. Drej forsigtigt.
4. Apparatet er nu kalibreret.

Tilslutning

1. Tilslut slangen med 3-vejsventilen til apparatet (Fig 1).
2. Tilslut derefter den valgte sensoren (ballon) til 3-vejsventilen ved hjælp af Luer Lock
3. Luk 3-vejsventilen (Fig. 3). Apparatet er nu klar til brug.

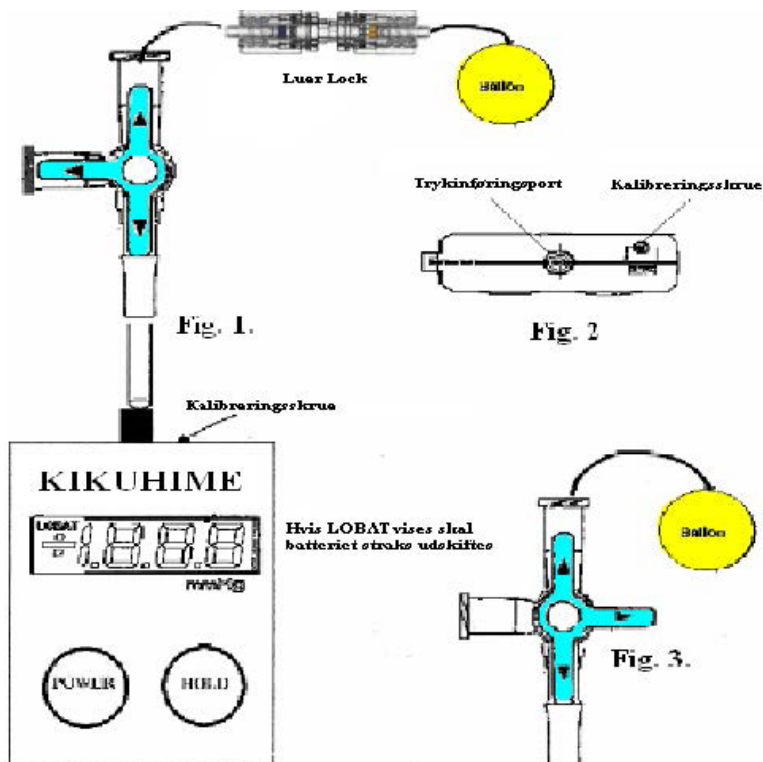

"Hold" knappen anvendes til at "fryse" et måleresultat

Anvendelsesområder

Subbandagestrykmåler til under kompressionsbandager og kompressions strømper

Anvendes til f.eks. oplæring af nyt personale. Kontrol af subbandagestryk, hvis man som ny behandler er usikker. Pædagogisk metode til at vise patienten, hvordan subbandagestrykket ændres under gang - motivere for motion af lægmuskel (muskul-venepumpe). Verificering af forskelligt subbandagestryk på malleol og bagved malleol - begrundelse for anvendelse af pelotter. Kontrol af kompressionsstrømper f.eks. ved opfølgingsbesøg/efterbehandling (forebyggelse af nye venøse bensår).

Anlæggelse af bandage og glidestykke med håndtag (lille sensor)


Sensoren placeres i glidestykket med håndtag ca. 1 cm fra bunden. Placer glidestykket med sensor i ankelniveau. Dernæst anlægges forbindelse og kompressionsbandage som vanligt. Nu kan subbandagestrykket i ankel niveau aflæses på displayet. Fjern sensoren ved at trække i slange og Easy Glide.

Anvendelsesområder af den store sensor

Subbandagestrykmåler til under kompressionsbandager, Eks.: Oplæring af nye sårbehandlere, Check af subbandage tryk, hvis man som ny sårbehandler er usikker, pædagogisk metode til at vise patienten, hvordan subbandage-trykket ændres under gang- motivere for motion af lægmuskel (muskul-venepumpe) Verificering af forskelligt subbandagestryk på malleol og bag ved malleol-begrundelse for oplæring af nye sårbehandlere.


Anlæggelse af bandage med glidestykke

Føleren placeres ca. 2 cm fra bunden i et dobbelt glidestykke i ankelniveau. (Om muligt kan man bede patienten fastholde glidestykke og slange ved knæet). Dernæst anlægges forbindelse og kompressionsbandage som vanligt. Nu kan subbandagestrykket i ankel niveau aflæses på displayet. Efter aflæsning kan føleren let og uden at bandagen ødelægges fjernes ved at række i slangen og det yderste stykke af det dobbelte glidestykke. Højere patient compliance ved anvendelse af kompressionsstrømper frem for bandager. - større sikkerhed for graderet subbandagestryk. Man kan eventuelt foretage endnu en aflæsning lige under knæet, således at den graderede kompression sikres.

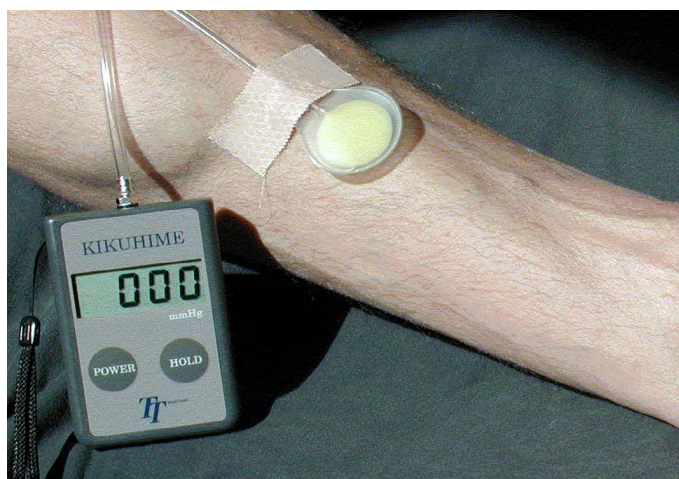

På billedet ses korrekt placering af sensor

Specifikationer

Kikuhime trykmåler	
Type	HPM - KH-01
Power-knap	Tænd/sluk funktion
Hold-funktion	"Fryser" måleresultatet
Måleområde	0-120 mmHg
Måling pr. sekund	Ca. 3 gange
Strømafbrydelse	Automatisk efter 3 minutter
Nøjagtighed	+/- 8 mmHg
Batteri	Brug kun ER6VM batterier - anden batteritype kan ødelægge apparatet eller give forkerte måleresultater
Rengøring	Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug aldrig benzin. Sensorer må kun rengøres med alkohol.
Advarsel	Undgå at åbne batteridækslet på Kikuhime's bagside. I tilfælde af behov for batteriskifte bør produktet returneres til TT-Meditrade.
	Type B patient del
Reklamation	Reklamationer på apparatet godtages inden for 2 år, (sensorer kun 1 år) gældende fra købsdato. Garanti-ydelsen er begrænset til erstatning af materiale og fabrikationsfejl ved selve apparatet. Reklamationsretten bortfalder ved misbrug, uhensigtsmæssig behandling, ved indgreb, eller ved anvendelse af andet end almindelig luft
Varenr.	KKH-001

Kikuhime sæt indeholder

- 1 Kikuhime trykmåler
- 2 sensorer - stor og lille
- 1 kalibreringsskruetrækker
- 1 stk. Easy Glide (glidestykke) med håndtag
- 1 opbevaringstaske



TT Meditrade | ZiboCare Denmark
Præstemarksvej 67, DK-8700 Horsens
Denmark
Tlf.: +45 7879 7069
E-mail: info@ttmeditrade.dk
SE: 29610274